

Gentile

Assistita, Assistito,

uno degli scopi dell'ossigenoterapia domiciliare è garantire la mobilità dei pazienti. Mobilità significa anche possibilità di recarsi in luoghi diversi rispetto al proprio domicilio abituale per trascorrere periodi in tutto relax.



Per garantire un viaggio ed un soggiorno piacevole e sicuro, chiediamo a Lei ed a Suoi eventuali accompagnatori di seguire alcuni semplici consigli e regole, ad integrazione delle informazioni già ricevute al momento della nostra prima visita d'attivazione del Servizio.

PREAVVISO

Avvisate il Vostro Centro Vivisol con un anticipo minimo di 7 giorni prima della partenza per destinazioni nazionali, 3 settimane per destinazioni internazionali.



Cercate di prevedere l'arrivo a destinazione in un giorno lavorativo. Avvisate sempre circa l'eventuale interruzione anticipata del vostro soggiorno. Vi informiamo che in caso di perdita e/o danneggiamento dell'apparecchiatura ne sarete ritenuti responsabili.

VIVITRAVEL

Soggiorno in CAMPEGGIO

Il soggiorno in campeggio richiede precauzioni aggiuntive rispetto a quelle già applicate presso il domicilio abituale.

Il soggiorno in tenda, la presenza di barbecue, di bombole per fornelli e di lampade libere, rendono potenzialmente più elevato il rischio correlato all'utilizzo di ossigeno liquido e gassoso.

Assieme alla direzione del campeggio occorre individuare soluzioni appropriate, come ad esempio soggiorno in bungalow e/o la custodia dell'unità base in luoghi protetti ma a disposizione per i riempimenti, come ad esempio l'infermeria.

E' perciò **NECESSARIO**:

- Informare la direzione del campeggio circa il proprio status di paziente in OTD, in modo da individuare eventuali soluzioni appropriate dal punto di vista della sicurezza.
- Una volta ottenuto l'assenso scritto da parte della direzione del campeggio, inoltrarlo a Vivisol.


Vivisol è a completa disposizione per fornire tutto il supporto tecnico ed informativo eventualmente necessario per individuare la scelta migliore.

VIVITRAVEL

SUGGERIMENTI

per l'assistito

VIVITRAVEL

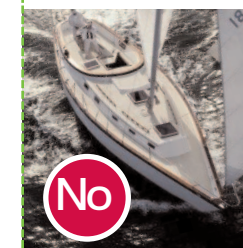

Assistenza

Viaggio all'ESTERO

Per i Vs programmi di viaggio all'estero, Vivisol è lieta di fornirVi le informazioni necessarie in funzione del Paese di destinazione e proporVi le proprie esclusive offerte di Assistenza



I CENTRI VIVISOL DI SUO ABITUALE RIFERIMENTO E DI DESTINAZIONE POTRANNO ASSICURARLE IL MIGLIORE LIVELLO DI ASSISTENZA OVUNQUE SI TROVI.



Staccare, compilare e inviare a VIVISOL

DATI PAZIENTE

Nome e Cognome: _____

Terapia: Ossigeno Liquido Concentratore

SOGGIORNO

Località _____

Prov. _____

Indirizzo _____

Telefono di soggiorno: _____

Data arrivo al luogo di soggiorno: _____

Data partenza dal luogo di soggiorno: _____

Note: _____

Data _____ Firma paziente o familiare

Presenza visione Ufficio distribuzione Centro VIVISOL

CONTATTATE IL VOSTRO CENTRO VIVISOL



FILIALE MILANO E COV. SSG

Tel. 02/26222569

Fax 02/26223985

COV BRESCIA

Tel. 030/3099431

Fax 030/301375

FILIALE E COV TORINO

Tel. 011/9016677

Fax 011/9016435

COV GENOVA

Tel. 010/8355081

Fax 010/8356501

COV IVREA

Tel. 0125/639283

Fax 0125/713886

COV CAGLIARI

Tel. 070/247331

Fax 070/247370

FILIALE E COV RAVENNA

Tel. 0544/451386 - 454991

Fax 0544/450812

COV GORIZIA

Tel. 0481/909323

Fax 0481/909324

COV PADOVA

Tel. 049/8701323

Fax 049/8701917

COV LIVORNO

Tel. 0586/425159

Fax 0586/408795

FILIALE E COV ROMA

Tel. 06/52200348 - 349

Fax 06/5290809

FILIALE ADRIATICA

Tel. 0731/207600

Fax 0731/208100

COV CHIETI

Tel. 0871/560942

Fax 0871/560007

FILIALE E COV CASERTA

Tel. 0823/821566

Fax 0823/821670

COV PALERMO

Tel. 091/8675969 - 8676053

Fax 091/8932005 - 091/8933092

COV PUGLIA

Tel. 080/4107354

Fax 080/937649

COV CATANIA

Tel. 095/291608

Fax 095/291827

VIVISOL - IL POINT SRL

Tel. 045/580892

Fax 045/8201089

VIVISOL NAPOLI SRL

Tel. 0823/821465 -

0823/821365

Fax 0823/821928

VIVISOL SILARUS SRL

Tel. 0828/301849

Fax 0828/308949

VIVISOL CALABRIA SRL

Tel. 0963/567484

Fax 0963/567243

VIVISOL DELLO STRETTO SRL

Tel. 0963/567770

Fax 0963/567243

VIVISOL UMBRIA SRL

Tel. 075/5001311

Fax 075/5054933

06/06

grafica
creativita



Assistenza

N° VERDE
di EMERGENZA
800.832004
ATTIVO 24 ore su 24



Liberi di Viaggiare

Vademecum per l'assistito



VIVITRAVEL

Home Respiratory Care



VIVITRAVEL

Viaggio IN TRENO

Se utilizza un'auto per raggiungere la stazione, La preghiamo di attenersi a quanto riportato in "VIAGGIO IN AUTOMOBILE".


Soluzione	Apparecchi consentiti
Ossigeno LIQUIDO	Unità portatili: tutte
Ossigeno GASSOSO	Bombole fino a 5 litri
CONCENTRATORI	Tutti
	Apparecchi sconsigliati
Ossigeno LIQUIDO	Unità Base
REGOLE GENERALI	
<p>Ricaricare il contenitore appena prima della partenza</p> <p>Specie se non accompagnati, portare con sé un solo apparecchio</p> <p>Non collocare apparecchiature nel portabagagli del treno</p> <p>Mantenere gli apparecchi in posizione verticale</p> <p>Non lasciare apparecchiature incustodite</p> <p>Viaggiare sempre in carrozze NON FUMATORI</p>	

Viaggio in AUTOMOBILE

L'automobile è il mezzo di trasporto più comune. Per salvaguardare la propria ed altrui incolumità, La preghiamo di attenersi a quanto segue.

Soluzione	App. consentiti	App. sconsigliati
Ossigeno LIQUIDO	Unità portatili: tutte	Unità base con cap.sup. a 20 lt
Ossigeno GASSOSO	Max 3 bombola da 2 lt Max 1 bombole da 5 lt	Bombole con capacità superiore a 5 lt
CONCENTRATORI	Conc. portatile	Standard (fissi) senza ns autorizzazione
REGOLE GENERALI		
<p>NON FUMARE</p> <p>Ricaricare il contenitore appena prima della partenza</p> <p>Portare un numero di apparecchi strettamente necessario all'utilizzo durante il viaggio</p> <p>Non collocare apparecchiature nel bagagliaio dell'auto</p> <p>Collocare gli apparecchi in posizione verticale ed assicurarli con le cinture di sicurezza in modo da evitarne gli spostamenti in caso di incidente</p> <p>Areare il veicolo durante il viaggio mediante piccola fessura dei finestrini (1-2 cm)</p> <p>Non lasciare il veicolo contenente apparecchiature incustodito o in pieno sole</p> <p>Assicurarsi della chiusura dei flussometri delle apparecchiature non utilizzate</p> <p>Mantenere l'unità portatile in posizione verticale</p> <p>Evitare la presenza di materiale infiammabile (benzine, olii...) in prossimità del flusso di ossigeno.</p> <p>Non usare l'ossigeno alle stazioni di rifornimento</p> <p>Disporre di un estintore a polvere di 2 Kg ancorato al pavimento</p>		

CONTATTATE IL VS CENTRO VIVISOL AL PIÙ PRESTO, INVIATE IL COUPON E SCOPRIRETE UNA NUOVA LIBERTÀ

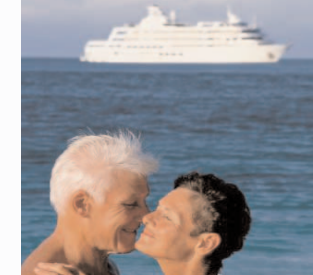

VIVI TRAVEL

Viaggio in AEREO

In generale, salvo qualche eccezione, le compagnie aeree non permettono al paziente l'utilizzo dei sistemi di erogazione di ossigeno personali. La Compagnia provvederà a fornire al paziente l'ossigeno richiesto durante il volo o a fornire l'autorizzazione per l'utilizzo dei concentratori portatili. In generale, le Compagnie richiedono dei prezzi aggiuntivi per la fornitura di ossigeno, giustificandoli con un temporaneo fermo del velivolo dovuto a manovre di blocco/sblocco del sistema di erogazione.

Contattate la vostra agenzia viaggi per conoscere le procedure adottate dalla compagnia aerea per i pazienti in ossigenoterapia.

Se utilizza un'auto per raggiungere l'aeroporto, La preghiamo di attenersi a quanto riportato in "VIAGGIO IN AUTOMOBILE".

Contattate il Vostro centro VIVISOL per organizzare il trasporto/ritiro delle Vs apparecchiature presso l'aeroporto.

Soluzione	Apparecchi consentiti
Ossigeno LIQUIDO	Unità portatili: solo vuote, come bagaglio a mano
Ossigeno GASSOSO	Solo quelle della Comp. Aerea
CONCENTRATORI	Portatili
	VIETATO
Ossigeno LIQUIDO	Unità Base
REGOLE GENERALI	
Il flusso di ossigeno è bloccato dal personale di bordo sul valore richiesto dalla prescrizione	
Il flusso di ossigeno non può essere modificato in funzione dell'altitudine	

Viaggio in NAVE

Generalmente, è sconsigliato imbarcare apparecchiature su imbarcazioni di piccolo cabotaggio a causa della loro elevata instabilità, con conseguente pericolo di rovesciamento e fuoriuscita di ossigeno, nonché della presenza di locali angusti e poco areati. Le imbarcazioni di grosso cabotaggio garantiscono maggiori opzioni per la stabilità dei Sistemi e locali più ampi.

Le compagnie armatrici permettono sia l'imbarco che l'utilizzo dei sistemi di erogazione di ossigeno. E' consigliabile utilizzare sistemi per Ossigeno Liquido: la comodità e l'elevata autonomia che garantiscono li rendono particolarmente adatti alla durata tipica delle crociere.

Le compagnie armatrici gestiscono le apparecchiature come merci, per cui, all'atto della prenotazione, è **NECESSARIO**:

- Avvisarle circa il proprio status di paziente in ossigenoterapia
- Richiedere loro autorizzazione all'imbarco
- Richiedere le modalità di ingresso al porto per la consegna ed il deposito delle apparecchiature, valido sia prima dell'imbarco sia una volta arrivati a destinazione

Se utilizza un'auto per raggiungere il porto, La preghiamo di attenersi a quanto riportato in "VIAGGIO IN AUTOMOBILE".

Contattate il Vostro centro VIVISOL per organizzare il trasporto/ritiro delle Vs apparecchiature fino al momento dell'imbarco e dal momento dello sbarco.

Soluzione	App. consentiti
Ossigeno LIQUIDO	Unità portatili: tutte Unità base: tutte
Ossigeno GASSOSO	Bombole fino a 5 litri
CONCENTRATORI	Tutti
REGOLE GENERALI	
Frequentate locali per NON FUMATORI	
Non lasciare apparecchiature incustodite	

PRIMA DI
PRENOTARE,
E' NECESSARIO
INFORMARE
LA COMPAGNIA
AEREA /AGENZIA
VIAGGI DEL
PROPRIO STATUS
DI PAZIENTE IN
OSSIGENOTERAPIA